

# Pikakäyttöohje

## Tutustumiskäyttö

Kirjaudu ohjelmaan DEMO-tunnuksilla:

Käyttäjätunnus: DEMO

Salasana: DEMO

(Huomaa ISOT kirjaimet.)

Ohjelmistoon voidaan tutustua: mm. katsoa tehtäväsovellusten animoidut mallisuoritukset, määrittelyt (miten voit muuttaa tehtäväsovelluksen toimintaa), tutustua tehtäväsovellusten keräämiin tuloksiin. Tutustumiskäytössä tehtäväsovellusten Aloita tehtävä –toiminto ei ole käytössä.

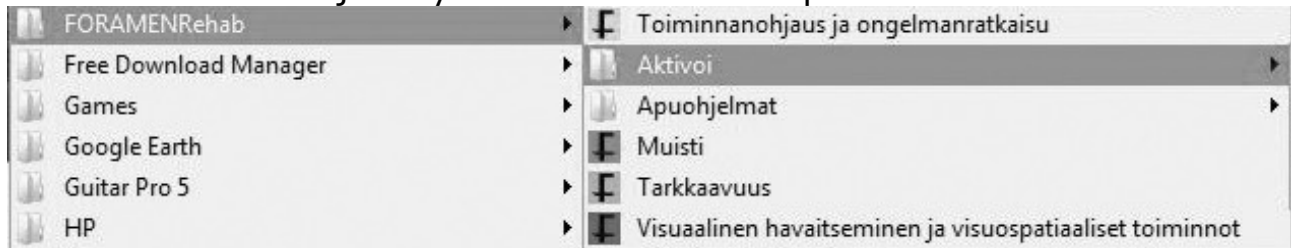
## Ohjelmiston kuntoutuskäyttö

Ohjelmiston käyttö kuntoutuksessa edellyttää asianmukaisen lisenssimaksun suorittamisen. Lisenssimaksun suorittamisen jälkeen sinulle toimitetaan aktivointitunnukset. Aktivoinnin jälkeen ohjelmistoa voidaan käyttää kuntoutuksessa: tehtäväsovellusten Aloita tehtävä –toiminto on käytössä.




## Yleiskatsaus FORAMENRehab-ohjelmistoon

### FORAMENRehab-ohjelmaryhmä ja -aliohjelmaryhmät:

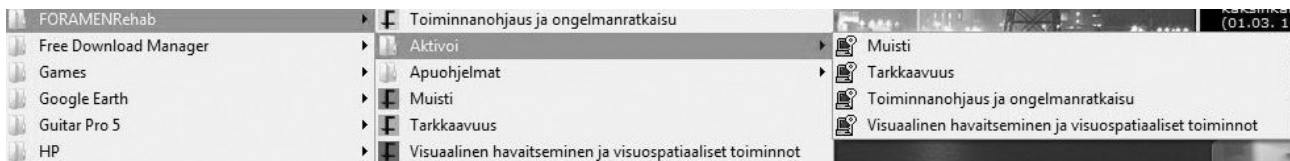
I. FORAMENRehab-ohjelmaryhmä sisältää seuraavat pikakuvakkeet:







| Pikakuvake   | Ohjelman/toiminnon lyhyt kuvaus  |
|--|--|
|  Tarkkaavuus  | Tarkkaavuuden häiriöiden kognitiiviseen kuntoutukseen tarkoitetun ohjelmiston pääkäyttöliittymä.   |
|  Muisti   | Muistin häiriöiden kognitiiviseen kuntoutukseen tarkoitetun ohjelmiston pääkäyttöliittymä.   |
|  Visuaalinen havaitseminen ja visuospatiaaliset toiminnot | Visuaalisen havaitsemisen ja visuospatiaalisten toimintojen häiriöiden kognitiiviseen kuntoutukseen tarkoitetun ohjelmiston pääkäyttöliittymä. |

|   |  |
|---|--|
|  Toiminnanohjaus ja ongelmanratkaisu | Toiminnanohjauksen ja ongelmanratkaisun häiriöiden kognitiiviseen kuntoutukseen tarkoitetun ohjelmiston pääkäyttöliittymä. |
|  Aktivoi                             | Modulien aktivointikuvakkeet sisältävä aliohjelmaryhmä.  |
|  Apuohjelmat                         | FORAMENRehab-ohjelmiston käyttöön liittyvien apuohjelmien käynnistyskuvakkeet sisältävä aliohjelmaryhmä.                   |

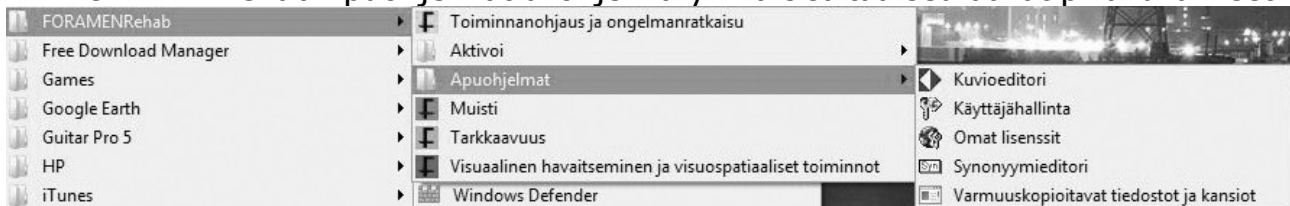
## II. FORAMENRehab Aktivoi-aliohjelmaryhmä sisältää seuraavat pikakuvakkeet:








| Pikakuvake  | Ohjelman/toiminnon lyhyt kuvaus   |
|---|---|
|  Tarkkaavuus   | Tarkkaavuus-modulin aktivointi.   |
|  Muisti  | Muisti-modulin aktivointi.  |
|  Visuaalinen havaitseminen ja visuospatiaaliset toiminnot | Visuaalisen havaitseminen ja visuospatiaaliset toiminnot -modulin aktivointi. |
|  Toiminnanohjaus ja ongelmanratkaisu                     | Toiminnanohjaus ja ongelmanratkaisu -modulin aktivointi.                      |

- Aktivointi edellyttää lisenssin hankkimisen.
- Kirjautumistunnukset Lisenssi- ja aktivointipalveluun toimitetaan, kun lisenssimaksu on suoritettu.

## III. FORAMENRehab Apuohjelmat-aliohjelmaryhmä sisältää seuraavat pikakuvakkeet:



| Pikakuvake   | Ohjelman/toiminnon lyhyt kuvaus   |
|--|---|
|  Kuvioeditori     | Konstruktio-tehtävissä käytettävien koostuneiden mallikuvioiden muokkaukseen käytettävä apuohjelma. |
|  Käyttäjähallinta | FORAMENRehab-käyttäjähallinta. Salasana: rehab  |
|  Omat lisenssit   | Linkki FORAMENRehab www -palveluun.   |

|   |  |
|---|--|
|  Synonymieditori                         | Muisti-modulin tehtävissä käytettävien synonyymien muokkaukseen käytettävä apuohjelma. |
|  Varmuuskopioitavat tiedostot ja kansiot | Varmuuskopioitavien tietojen kansion avaaminen tiedostonhallinnassa.                   |